

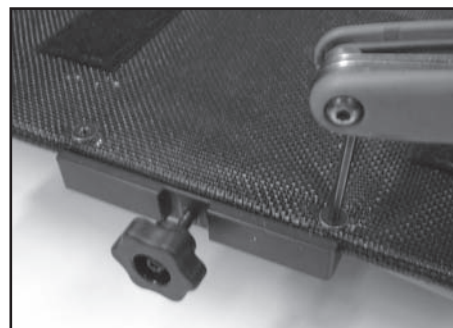
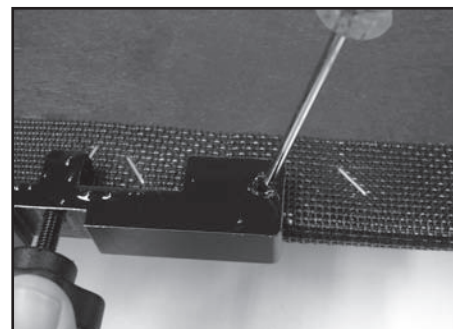


Monteringsanvisning Abduksjonskloss

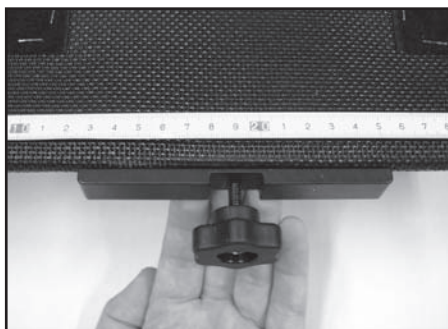

Verktøy: syl, 6mm bor & 4mm unbrako

1. Plasser låsebraketten i senter av seteplaten.
2. Bruk en syl til å merke posisjon for låsebrakettens skruerhull.
Låsebraketten monteres på UNDERSIDEN av seteplaten.
3. Bor to hull gjennom seteplaten og monter braketten på undersiden av seteplaten ved å skru skruene ovenfra og ned med en 4mm unbrakonøkkel.
4. Monter abduksjonsklossen ved å sette abduksjonsklossens justerstag ned på brakettens låseskrue. Fest abduksjonsklossen ved å skru til låseskruen.
5. Abduksjonsklossen kan justeres 8cm i høyde (5B) for å passe til alle type puter. Abduksjonsklossen kan justeres 10cm i dybde (5A) for individuell tilpasning.

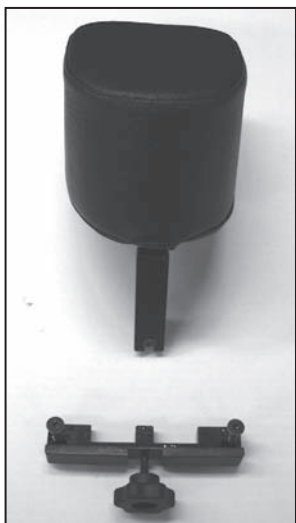

Artikkelnummer	Artikkel
27490	Abduksjonskloss Liten 80mm
27491	Abduksjonskloss Medium 110mm
27492	Abduksjonskloss Stor 140mm

