


## Monteringsveiledning for Jap-enhet

Verktøy: 4mm og 5mm unbrakonøkkel, 8mm og 10mm fastnøkkel og avbitertang.

Anti tip må fjernes for å kunne ha en Jap enhet påmontert. Jap enheten vil ta over funksjonen som anti tip. Anti tipen fjernes ved å skru ut skrue og mutter (bruk 4mm unbrakonøkkel) fremme på nedre rammerør og dra anti tipen ut. Skru deretter skrue og mutter inn igjen.


Skrue for demontering av anti tip

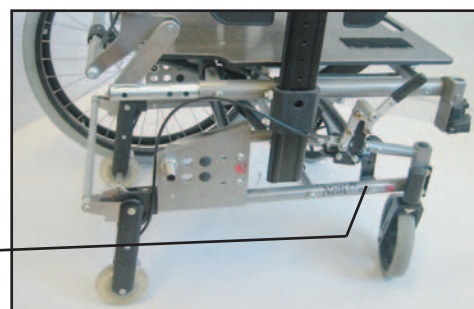

Sett Jap enheten med festeakslingene inn i hullene for anti tip på stolrammens nedre rammerør og skru fast på begge sider med medfølgende skruer M6x25 (bruk 5mm unbrakonøkkel).



Plasser bremsene i ønsket posisjon og skru fast bremseklemme og brems. Trekk wire (skal være 700mm) og wirestrømpe (skal være 550mm) frem mot bremsen og trekk wire gjennom stillskruen (stillskruen må være skrudd nesten helt inn) og så gjennom festeskruen på brems. Sett brems i aktiv posisjon (trekk bremsepak bakover), dra wire hardt fremover slik at brems på Jap enheten presses mot hjulet, stram mutter (bruk 10mm fastnøkkel) på festeskruen (tannskive skal ligge oppå wire) og kapp wire ca.30mm etter at den er festet mutter og sett på endehylse. Skru ut stillskruen og se etter at Jap enheten bremses godt på begge sider.

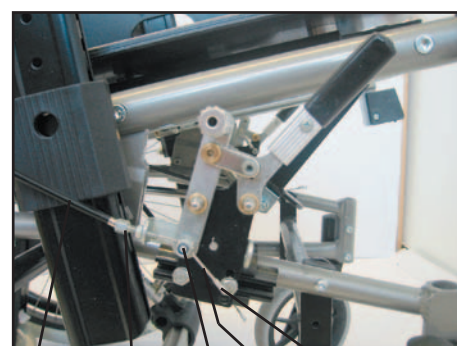

Wire-  
strømpe    Stillskruen    Mutter  
Festeskrue    Wire    Endehylse

## Brukerveiledning for Jap-enhet

For å kunne aktivere Jap enheten som anti tip fra å være aktivert for å kunne ta av drivhjulnene, så må man tråkke ned det øverste staget som vist på bilde 1A for så å trekke det nederste staget bak/oppover med fotsålen som vist på bilde 2A .



For å kunne aktivere Jap enheten slik at man kan ta av drivhjulene fra anti tip posisjon så må man tråkke på det øverste staget som vist på bilde 1B til Jap enheten ikke er i lås. Trakk deretter på det nederste staget som vist på bilde 2B og løft stolen etter skyvebøylen mens du trækker Jap enheten inn under stolen til den stopper og klikker i lås. Bilde 3B viser Jap enheten aktivert slik at man kan ta av drivhjulene.

**NB:** Når Jap enheten er aktiv og stolen ikke har drivhjulene på, må man aldri endre posisjon på Jap enheten ved å utløse noen av stagene, da dette vil gjøre at stolen faller bakover og bruker kan ta skade.



For å sette JAP enheten i horisontal posisjon for passering av fortauskanter o.l., så må man løfte det øverste staget med venstre hånd og dra det nederste staget med høyre hånd bak/oppover som vist på bilde 1C til man hører/kjenner at den går i lås. For å aktivisere anti tipen, så skal man presse det nederste staget nedover med foten som vist på bilde 3C til den går i lås. Bilde 2C viser Jap enheten i øverste posisjon.

