

PRODUKTINFORMASJON

Dato: 28/1 - 2008	Produktinfo.: 2-2008	Skrevet av: Fredrik Delås
Artikkel: Sittepute Uno Seat	Levering: Fra dags dato	

Sittepute Uno Seat vil erstatte sittepute Netti Single.

Sittepute Uno Seat er produsert av Alu Rehab og vil erstatte sittepute Netti Single i løpet av januar/februar 2008. Når vi er tomme på lageret med Netti Single, vil våre kunder i stedet motta Uno Seat.

Oppbygging:

Kjernen: Uno Seat er alltid klar til bruk! Avhengig av størrelsen på puten er Uno Seat tilpasset ulike brukervekt. Puten er bygget opp av fire lag Polyurethanskum – med ulike egenskaper og bæreevne. To av lagene ligger ved siden av hverandre horisontalt i midsjiktet. I bakkant er det lagt inn et mykere skumlag, mens det i fremkant ligger et noe fastere, dette for å ivareta stabilisering av bekkenet i forkant av sitteknutene og forebygge at man sklir framover. På toppen er det brukt et mykt skum som tillater rask innsynking, og som samtidig skaper en stor kontaktflate for optimal trykkfordeling. Skummet i bunnen er noe fastere, og forhindrer at man sitter gjennom puten.


Trekk:

Uno Seat blir levert standard med 2 ulike yttertrekk; Mars og Easycare.

Mars yttertrekk er et 100% strikket polyester. Trekket er meget slitesterkt og strekkbart, og har svært god luftgjennomtrengelighet. EasyCare er et inkontinestrekk som er tilsvarende TechmaFlex som brukes på Netti Single. Trekket forhindrer forurensning av kjernen, og er lett vaskbart. Disse to yttertrekkene kan med fordel kombineres.

Dokumentasjon:

Uno Seat har gjennomgått grundig testing omfattende blant annet biokompatibilitet og brannhemming.

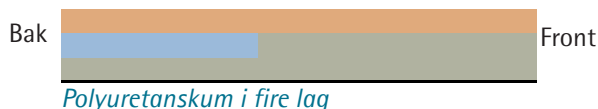

Enkel i bruk



Stabiliserende



Trykkfordelende