


BRUGSANVISNING HÆL-CARE

Hæl•Care puden anvendes f.eks. til aflastning af hælene og kan anvendes sammen med Sof•Care madrasser eller på standard madrasser.




Træk Hæl•Care puden omkring madrassen.

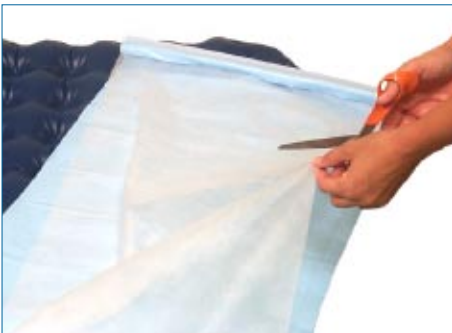

Er standard madrassen 'for tyk' til at Hæl•Care puden kan trækkes omkring denne, klippes lærredet over på midten.



Fikses under madrassen som etlag.

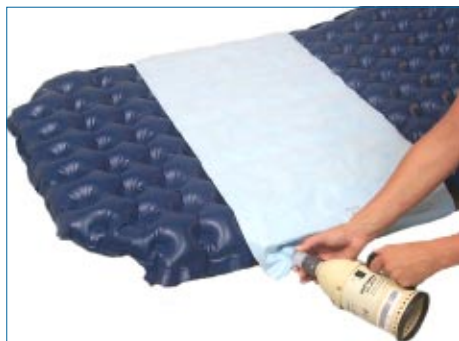

Fyld puden med fyldepumpen ca. 4 sek. og skru proppen på.



Placér puden under læggene således at hælene er fri af underlaget.



Tøm puden for luft ved at trække ventilen ud. Juster luftmængden ved forsigtigt at trykke/ presse i et af de små grå huller.

Forsigtigt

⚠ Kontroller ofte huden. Søg læge, hvis der forekommer rødmen eller brud på huden.

ALVORLIG personskade kan opstå, hvis tilstanden ikke behandles.

Rengøring af Hæl•Care puden

Gør sengepudden ren med et mildt desinfektionsmiddel



ALU_REHAB™

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8, 8680 Ry

CVR 13868670

Tlf. 87 88 73 00

Fax 87 88 73 19

Mail: info@alurehab.dk

www.alurehab.dk