

# Tilbehør:

Det finnes et rikt utvalg av tilbehør til Netti rullestolene - her er noen eksempler.

Hodepute Comfort - HMS nr: 026551.

Universalbord m/lås, opp- og nedfellbart. Str. Medium sb 35-40 HMS nr 154462. Str. Stor sb 43-50 HMS nr 154464.

Ulike typer belter med plastlås eller billås, enkelt eller polstret. Hoftebelte polstret med billås HMS nr 026618.

Hemipute Hareid. HMS nr: 025925.

Sittepute Vital Base Royal. Kommer i mange størrelser. Se hjemmeside for HMS nr.

Vital Base Integral gir økt bekenstabilisering, kan benyttes i kombinasjon med alle våre sitteputer. HMS nr: 017874.

Comfortpads til CED/CEDS. HMS nr: 154647 høyre side. HMS nr: 154646 venstre side.

Polster til armlenpads. Art. nr: 41649.

Ryggputer - med forskjellig grad av støtte og avlastning, se hjemmeside for varianter og HMS nr.

Drivhjul med ledsagerbrems. Finnes i 12", 20", 22" og 24". HMS nr for 24": 027001.

Diverse polster for leggstøtte. Se hjemmesiden for varianter og HMS nr.

Se vår hjemmeside [www.alurehab.no](http://www.alurehab.no)

## Tekniske spesifikasjoner:

Art. nr.	HMS nr.	Setebredde	Totalbredde*	Setedybde** (min.-maks.)	Setehøyde*** (min.-maks.)	Rygg høyde	Brukervekt (maks.)	Vekt
40875	154679	35 cm	53 cm	37-50 cm	41,5-50 cm	48 cm	opptil 130 kg	27,9 kg
40876	154680	40 cm	58 cm	37-50 cm	41,5-50 cm	48 cm	opptil 130 kg	28,4 kg
40877	154681	43 cm	61 cm	37-50 cm	41,5-50 cm	48 cm	opptil 130 kg	28,6 kg
40878	154682	45 cm	63 cm	37-50 cm	41,5-50 cm	48 cm	opptil 130 kg	28,9 kg
40879	154683	50 cm	68 cm	37-50 cm	41,5-50 cm	48 cm	opptil 130 kg	29,9 kg

Forklaring til tabellen:

\* Totalbredden er stolens setebredde + 18 cm.

\*\* Setedybden kan ved behov enkelt økes til inntil 50 cm uten deleskift.

\*\*\* Setehøyden er målt fra gulvet til topp seteplate (uten sittepute). Ved hjulskift kan setehøyden tilpasses mellom 41,5 og 50 cm + pute.

Setehøyder med 24", 22", 20", 16", og 12" hjul.

24" drivhjul og 7" svinghjul: I øverste posisjon A = 46,5 cm

I nederste posisjon B = 50 cm

22" drivhjul og 6" svinghjul: I øverste posisjon A = 43,5 cm


I nederste posisjon B = 47 cm

20" drivhjul og 5" svinghjul: I øverste posisjon A = 41,5 cm

I nederste posisjon B = 45 cm

16" drivhjul og 7" svinghjul: Kun en plassering C = 46,5 cm

12" drivhjul og 7" svinghjul: Kun en plassering D = 46,5 cm

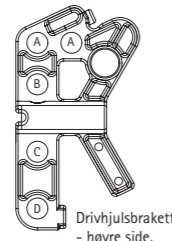

Drivhjulbrakett - høyre side.

Oversikt tippesikringer for Netti 4U komfort CEDS		
Beskrivelse/varenavn	Hjulstørrelse	Artikkelnummer
Tippesikring Netti 4U høy STD	24"	28018
Tippesikring Netti 4U lav	22"	28816
Tippesikring med vippepedal	22" og 24"	28972
Tippesikring med vippepedal	20"	41818

Rullestolen er testet av TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland ihht. til europeisk standard DIN EN 12183:1999. Rullestolene er også krasjtestet ihht. ISO 7176/19.

**Alu Rehab AS**  
Bedriftsveien 23, 4353 Klepp stasjon  
Tlf. 51 78 62 20, Fax 51 78 62 21  
E-post: [post@alurehab.com](mailto:post@alurehab.com)

**ALU REHAB™**  
Thinking ahead - moving forward

[www.alurehab.no](http://www.alurehab.no)

**ALU REHAB™**  
Thinking ahead - moving forward

# Netti 4U komfort | CEDS

- stolen som gjør hverdagen enklere for bruker og medhjelper!

- Kompakt - lav vekt og smal totalbredde
- Enkel i bruk
- Ergonomiske løsninger i godt design
- Justerbar setedybde: 37-50 cm



Stolen er enkel i bruk - alle reguleringer er merket med rødt og har en logisk plassering og utforming. Med justerbare setedybde fra minimum 37 cm til maksimum 50 cm - er stolen svært godt egnet for både korte og lange personer. Smal totalbredde og lav totalvekt gjør stolen lett å forflytte og manøvrere på steder med liten plass, og den egner seg for transport i bil.

### Netti 4U komfort|CEDS leveres med følgende standardutstyr:

- RYGG/SETE** Standard rygg med velcro. Trinnløs regulerbar rygg: 90-135°. Ryggen kan felles ned ved transport. Trinnløs regulerbar tilt (-5° til +20°)
- RYGGPUTE** Ryggpute UNO|Back, festes med velcro og kan tilpasses trinnløst i høyden.
- SITTEPUTE** Leveres med sittepute UNO|Seat.
- HODESTØTTE** Leveres med hode støtte C - stor.
- ARMLENE** Oppfellbart, kan felles bakover for lettere sidevegsforflytning. Med klesbeskytter, høydejusterbart og armlenpadsen kan lett reguleres.
- BENSTØTTER** Vinkelregulerbare benstøtter, de er lengdejusterbare, utsving- og avtagbare.
- HJUL** 24" drivhjul og 7" svinghjul.

