



Monteringsanvisning Sidestøtte Stabil

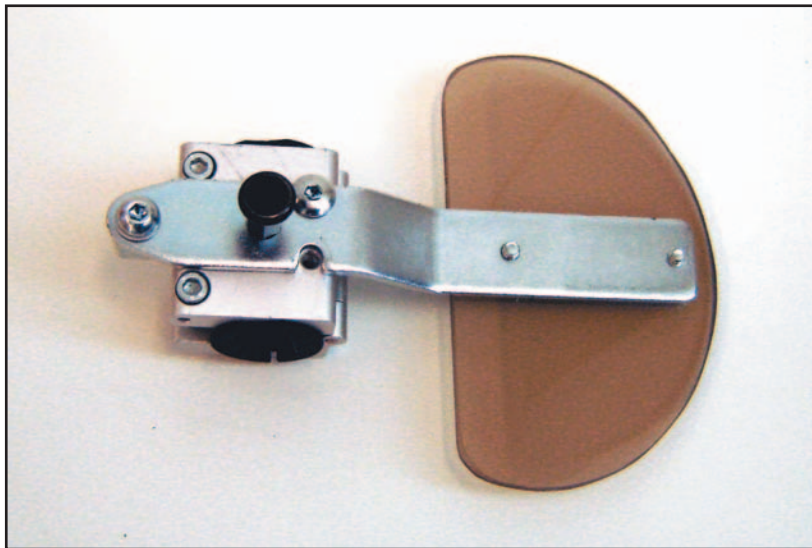

Artikkel	Artikkelnummer
Sidestøtte Stabil Venstre	26830
Sidestøtte Stabil Høyre	26843

Verktøy: 6 mm Unbrako og en skarp kniv

Skru ut de to skruene som holder sidestøtteklemmen sammen, og åpne klemmen.

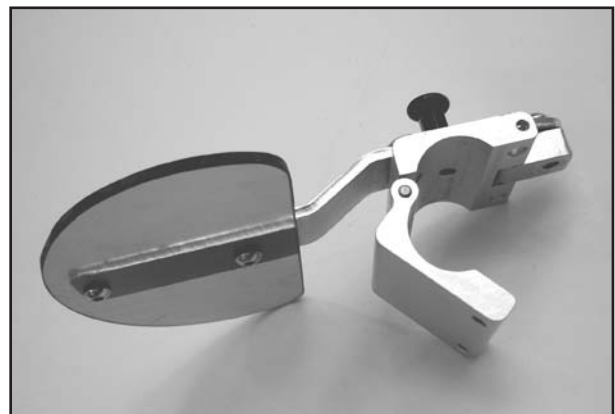

Hvis sidestøtten skal monteres på en stol med firkantede ryggrør, brukes den vedlagte plastforingen.



Etter tilpasning av ryggputen, finn riktig høyde for sidestøtten. Støtten skal stå parallellt med sidestøtten i ryggputen. Skjær deretter ut et stykke av velcro-ryggen slik at klemmen får plass rundt hele ryggrøret.

Ved montering på firkantrør, plasser først den vedlagte foringen rundt ryggrøret.



Klemmen monteres og skruene trekkes til. Før skruene trekkes til roteres sidestøtten rundt ryggrørene for å øke eller minske stabiliteten.



For å løse ut sidestøtten, trekkes utløserhendelen ut.

